

MadaCide-FDW-PLUS

Toallitas para limpieza de superficies / Desinfecta y Deodoriza

Distribuidor Exclusivo:

TecniMed
soluciones vitales

Tel: 22331560 y 23330534



EFFECTIVO CONTRA:

- ✓ Staphylococcus Aureus
- ✓ Pseudomonas Aeruginosa
- ✓ Salmonela enterica
- ✓ Tuberculosis micobacteriana
- ✓ Staphylococcus aureus-MRSA resistente a la meticilina
- ✓ Enterococo resistente a la vancomicina faecalis-VRE
- ✓ Influenza A- (A2 Japón)
- ✓ Escherichia coli 0157: H7
- ✓ Virus de la hepatitis B humana
- ✓ Virus de la hepatitis C humana
- ✓ Virus del herpes simple 2 (virus del herpes genital)
- ✓ VIH-1 (virus del SIDA) (con un tiempo de exposición de 1 min)
- ✓ Trichophyton mentagrophytes (Hongo del pie de atleta)

160 Toallas pre-saturadas (6"x 6.75")



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: TECNIMED.

23 CALLE 14-58 Z.4 MIXCO CONDADO EL NARANJO, EDIFICIO CRECE, TORRE 1, DISTRILocal 1. GUATEMALA. TEL: 22331560 Y 23330534

REGISTRO EPA

MadaCide-FDW-PLUS

Las toallitas MadaCide-FDW-PLUS son paños desechables no tejidos que contienen un limpiador desinfectante y desodorante formulado de pH bajo y estable, y están diseñados para su uso en superficies duras y no porosas.

ORGANISMOS

TIEMPO DE CONTACTO

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Mycobacterium tuberculosis, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus - MRSA, Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis - VRE, Influenza A - (A2 Japan), Escherichia coli 0157:H7, Human Hepatitis B virus, Human Hepatitis C virus, Herpes Simplex virus 2 (genital herpes virus), HIV-1 (AIDS virus)** (At an exposure time of 1 min)

2 minutos

Trichophyton mentagrophytes (Athlete's foot fungus)

5 minutos

ÁREAS DE USO:

Acero inoxidable, fórmica, mesas, carros, cestas, mostradores, gabinetes y teléfonos. Este producto puede usarse en hospitales, unidades de cuidados intensivos, cirugía, recuperación, anestesia, rayos X, laboratorio de cateterización, ortopedia, enfermería para recién nacidos, terapia respiratoria, accesorios médicos de emergencia, clínicas, instalaciones de enfermería, guarderías, consultorios médicos, consultorios dentales, consultorios, baños, instalaciones veterinarias y administrativas donde se requiere control de contaminación cruzada.

TecniMed
soluciones vitales

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: TECNIMED.

23 CALLE 14-58 Z.4 MIXCO CONDADO EL NARANJO, EDIFICIO CRECE,
TORRE 1, DISTRILocal 1. GUATEMALA. TEL: 22331560 Y 23330534

 **MADA**
MEDICAL PRODUCTS, INC.