

MEDLANCE^{plus}

Características del producto

● **Seguro:** un solo uso, autodestructibles. Ninguna posibilidad de reutilización.

● **Simple:** operación intuitiva de 2 pasos. Tomar muestras de sangre es más fácil que nunca.

● **Estéril:** agujas esterilizadas con radiación gamma.



CE 0344

Comfort MA

● **Suave:** agujas con filo extremo, óptimamente posicionado durante la penetración de la piel.

● **Versátil:** disponible en 5 versiones diferentes para satisfacer las necesidades de específicas de muestras de sangre y acomodar la variedad de tipos de piel de los pacientes.

● **Eficiente:** un diseño técnico independiente asegura un flujo adecuado de sangre.



CAJA 100unids
200unids

MEDLANCE^{plus}



HTL STREFA
high tech lab

Distribuido en los Estados Unidos por:
HTL-STREFA, Inc.
3005 Chastain Meadows Pkwy, Suite 300,
Marietta, GA 30066, USA
T: +1 770 528 0410, F: +1 770 528 0411
info@htl-strefa.com • www.htl-strefa.com

Fabricado por:
HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7,
95-035 Ozorków, Poland
T: +48 22 587 05 72, F: +48 22 811 05 36
info@htl-strefa.pl • www.htl-strefa.pl



553-556/MP/ES/01/2012/rev.1

MEDLANCE^{plus}


Lancetas de Seguridad



MEDLANCE^{plus}

Instrucciones de Uso

1. Desenrosque

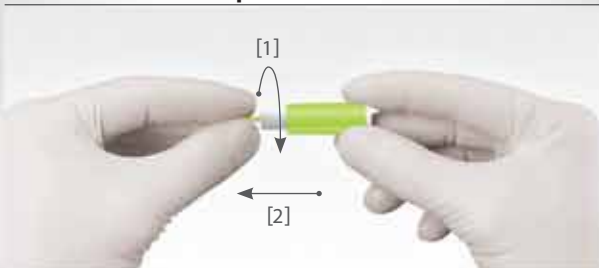

Desenrosque la tapa protectora y jale la tapa hacia afuera.

2. Presione



Presione la lanceta Medlance plus firmemente contra el sitio de punción para activar el dispositivo. Deseche la lanceta usada en un contenedor de punzocortantes aprobado.

3. Colecte



Suavemente aplique presión intermitente cerca del sitio de punción para obtener el volumen de sangre necesario.

30G
Punta de Aguja

Profundidad
1.2 mm

**Comfort
MAX**



Medlance^{plus}
SuperLite

No. Cat.: 7241
Caja 200 unids.
No. Cat.: 7242
Caja 100 unids.

25G
Aguja

Profundidad
1.5 mm



Medlance^{plus}
Lite

No. Cat.: 7043
Caja 200 unids.
No. Cat.: 7243
Caja 100 unids.

21G
Aguja

Profundidad
1.8 mm



Medlance^{plus}
Universal

No. Cat.: 7044
Caja 200 unids.
No. Cat.: 7244
Caja 100 unids.

21G
Aguja

Profundidad
2.4 mm



Medlance^{plus}
Extra

No. Cat.: 7045
Caja 200 unids.
No. Cat.: 7245
Caja 100 unids.

0.8mm
Cuchilla

Profundidad
2 mm



Medlance^{plus}
Special

No. Cat.: 7046
Caja 200 unids.
No. Cat.: 7246
Caja 100 unids.

Colectar sangre nunca ha sido tan fácil! Con una aguja de 30G especialmente diseñada para asegurar el mayor confort del paciente sin comprometer usabilidad.



Ideal para monitoreo de glucosa de sangre.



Para cuando necesite grandes volúmenes de muestras de sangre para la prueba de glucosa, la hemoglobina, el colesterol estudios de tipo de sangre, coagulación, gas en la sangre y muchos otros.



Es la piel del paciente muy dura? Más sangre es necesaria? Use Medlance plus Extra y coleccionará mas sangre. También se para coleccionar grandes muestras de sangre de los hombres y trabajadores de labores físicas.



Medlance plus Special es perfecta para las pruebas que requieran mas volumen de muestras de sangre. La cuchilla extra afilada garantiza un adecuado volumen de sangre y sanación rápida.

